

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Spilerdug og bestilling af spilerdug

ormål: Information om bestilling og vask af spilerdug.

Spilerdug er et forflytningshjælpemiddel. Kan også anvendes som hjælpemiddel til at få tøj, inkl. kompressionsstrømper på. Søg vejledning hos din forflytningsvejleder.

Spilerdugen er i sygeplejedepotet på Albertshøj.

Hvis du sammen med din forflytningsvejleder vurderer, at der skal anvendes spilerdug hos en beboer, skal der sendes en mail, til udviklingspsygeplejersken som vil sørge for leveringen
Jeanette.erceninks@albertslund.dk

Tlf: 51684012

Husk at angive hvor langt det skal være.

Spilerdugen må ikke anvendes af flere beboere.

Spilerdugen kan rengøres / aftørres med sprit 70 %. Hvilket bør gøres en gang om ugen, hvis der ikke er synlig forurening på.

Ved synlig forurening, skylles dette af under vandhanen, hvorefter aftørring med sprit 70 %.

Spilerdugen kan maskinvaskes på skåneprogram, med lav centrifugering på 60 gr.

Spilerdugen mister effekt ved hver vask, derfor må den vaskes 4 gange, herefter skal den smides ud.

For hver gang du maskinvasker spilerdugen, skal du klippe et lille stykke af et af hjørnerne, således, at når der er klippet i 4 hjørner, skal spilerdugen kasseres.

Efter vask i vaskemaskinen eller aftørring med sprit 70 % kan spilerdugen godt anvendes til en anden beboer.

Udsendt første gang: <input type="text" value="16.04.2014"/>	Revideret: Af udviklingssygeplejerske <input type="text" value="27.05.16"/> <input type="text" value="22.02.18"/>	Denne udgave er godkendt af Leder på plejeboligområde Mona Tina Funch Lagt på www.plejebolig.albertslund.dk og gældende fra: <input type="text" value="22.02.18"/> SB-SYS: Procedurer
---	--	---